

為您的親人提供保護的監測儀器

主要用途

醫院, 看護設施

- 可以減輕夜間巡視的工作量
- 當患者出現狀況惡化時可迅速處置
- 可用於健康管理及預防措施等

家庭看護

- 外出旅行, 或是上班時也可以確認親人的狀況, 可以非常放心。
- 得到家人許可的主治醫生, 護士可以同時掌握狀況

其他

- 可把握老人獨居的生活狀態

使用體驗

護理工作者

深夜執夜勤時可以掌握各個患者的狀況, 非常有用。

在護理設施裏, 它大大減輕了我夜間巡視的工作量, 讓我可以對患者狀況的惡化或變化做出及時應對, 同時可以將數據用於健康管理和預防。實際使用中就有通過【安心羊α】的報警, 使突發病患者得以及時搶救, 也大大減輕了我的負擔。

護理經理

【安心羊α】是一種能夠讓不在身邊的家人也可放心的革命性監測儀器。

在醫院和護理設施裏, 工作人員不可能隨時在患者身邊監控。【安心羊α】可通過電腦24小時監控患者的情況。同時, 不在身邊的家人也可以通過手機或電腦掌握患者情況。我覺得這是一個革命性的新儀器。

訪問護理師

根據數據進行及時的處置, 為家人減輕負擔

【安心羊α】可代替家庭護理者為我們提供數據。根據情況決定是否訪問或聯係主治醫生, 並採取及時措施。同時也可以大大減輕家庭護理的親屬們的負擔。

使用實例 1

家庭護理
家庭醫療
使用者

【安心羊α】

手機及電腦

雲端處理

LINE

醫院設施

外出中的
患者家人

使用實例 2

醫療設施
護理設施
使用者

【安心羊α】

設施的電腦

雲端處理

LINE

巡視中的
職員

外出中的
患者家人



※此服务仅在日本提供

製品仕様

項目	内容	備考	項目	内容	備考
形式	SSS-2001		信號方式	壓力變化感應裝置	
種別	機械器具21内臓機能検査器具		對象的年齡	12歲以上	
醫療儀器編號	07B3X10005620109		入力電源	AC100V50~60Hz	限日本國內對應
名稱	一般名稱: 體動監測儀 / 產品名稱: 安心羊α		消費電力	3Wh以下	
等級分類	等級 I (一般醫療機器)		動作溫度範圍	10~35℃	只限室內
對電擊的保護形式	等級 II 機器		動作濕度範圍	30~85%	只限室內
尺寸	長800mm × 高17mm × 寬150mm		動作氣壓範圍	700~1060hPa	
條形碼	4589810-40027	本体・表示機	冷卻方式	自然冷卻	

本製品, 不屬於疾病診斷或以醫療為目的的機械器具。

生產銷售者



株式會社 NJI

TEL.0120-914-469
https://www.anshin-hitsuji.jp

諮詢

R0105-M-1M-C

體動監測儀 安心羊[®]α



醫療儀器編號 07B3X10005620109



用手機

用電腦

為您解決
以下問題



對護理設施中的
複數病床進行
統一管理

作為出診的
一部分想瞭解
患者狀況

擔心住在
遠方的獨居的
家人

不在家的期間,
擔心臥床的
爺爺的身體

安心ひつじα 是一臺不僅能監視床上的體動， 離床，還可以測量睡眠狀況的監測儀器

【安心羊α】是一臺能夠同時測定睡眠中的體動，心跳，呼吸及離床4個項目的體動監測儀。可放在床墊下，使用手機*電腦*通過通訊設備看到監測到的4個數據。

※有一部分機種不能對應



圖表的
詳細表示

顯示畫面的機能・特長

可掌握和確認日常的身體・生活狀況

- ①可掌握離床狀態
- ②以顏色區分臥床，離床，體動狀態
- ③畫面右側是被選擇圖表的詳細內容，一定期間（最近1小時，當天1天，昨天1天）的心跳，呼吸可通過圖表確認。

青：臥床中 灰：離床中 橘：體動中



低價格的 簡單檢測系統

只要有網絡環境，不需要設置專用裝置。通過對檢測系統的小型化，實現了易於大眾購買的低價格。

實例圖



出現異常時通過
LINE通知
前一天的狀態
以摘要形式通知



●藍色:男性 ●粉紅色:女性

示例圖

將日常生活 【可視化】

不只是測定體動和離床，同時搭載可測量心跳及呼吸的機能。實現高精度數據測量。

不影響睡眠的 非穿著式監測

由於祇在床墊下鋪上極薄的墊子，可在無任何感覺和不適的情況下進行測量。

實現4種
可視化

體動

心跳

呼吸

離床

① 使用者狀況畫面



緊急情況時的使用者狀況圖標
在發生緊急情況時
背景變為粉色

③ 使用者圖表畫面

