

## 基本プラン（無料）

### 【対象】

- ★一人暮らしの方
- ★介護・医療の必要な方
- ★ご自身の健康管理をしたい方





※ ご自宅内閲覧可能

## データ管理（有料プラン）

### 【対象】

- ★ご家族の方
- ★ご親戚の方
- ★ご近所の方
- ★かかりつけ医
- ★医療従事者
- ★介護施設…

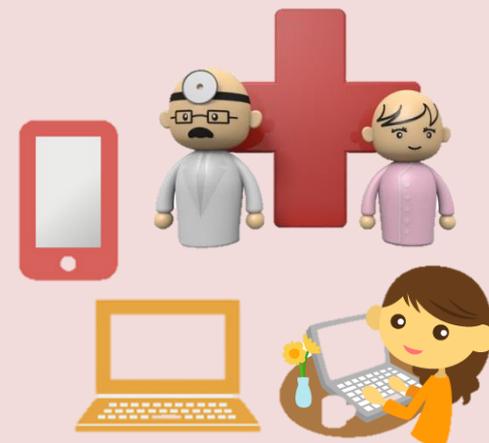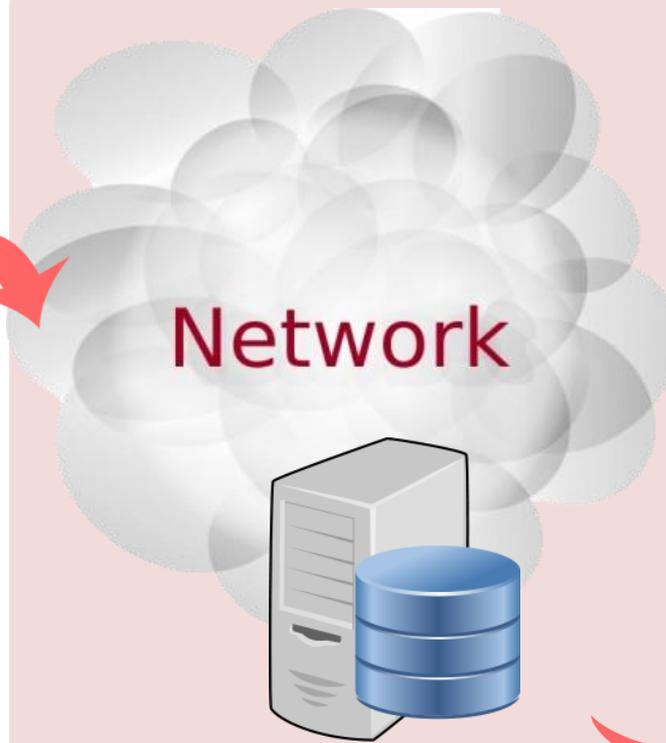

※ メールでの状況送信

※ モニターdataとの情報共有

項目	金額
有料プラン	金額はお問い合わせください

# ご購入後 安心ひつじホームページより 登録お願い致します。



## ①ユーザー登録

### STEP 1

ユーザー登録  
設定

安心ひつじのホームページから『ユーザー登録』して下さい

### STEP 2

同意書  
個人情報シート記入

同意書を読んで頂き『同意』頂いた後、個人情報シート\*印に記入下さい

### STEP 3

設定後  
確認→完了

記入後『確認』ボタンを押して内容確認頂き問題なければ『登録』して下さい

### STEP 4

グループ・個人コード  
PASSWORDの発行

安心ひつじαセンサのグループ・個人コードPASSWORDが登録されたメールが届きます

使用までの登録方法

①ユーザー登録

②基本プラン登録

③有料プラン登録

事前準備

iPhone・購入された製品を取り出し、センサと通信ユニット・ACアダプタを接続して下さい

※通信ユニットの緑のランプが点滅している事を確認して、登録を進めて下さい

## ②基本プラン登録

### STEP 1

iPhoneと通信ユニット  
を接続します

同梱されている『iPhoneと通信ユニット接続手順』をご覧ください

### STEP 2

iPhoneに専用アプリを  
インストールします  
App Storeより入って下さい

同梱されている『iPhone安心ひつじモニターダウンロード手順』をご覧ください

### STEP 3

グループ・個人コード  
PASSWORDの登録

発行されたコードとPASSWORDを入力して下さい

### STEP 4

センサ使用開始

全て登録が完了いたしました  
センサが使用できます

## ③有料プラン登録

※STEP 1～3は同じ登録

### STEP 4

iPhoneに専用アプリを  
インストールします  
App Storeより入って下さい

同梱されている『iPhone安心ひつじビューアダウンロード手順』をご覧ください

### STEP 5

カード決済  
確認→完了

ホームページより入って頂きカード決済を行って頂きます  
決済完了後『確認』ボタンを押して内容確認頂き問題なければ『登録』して下さい

### STEP 6

グループ・個人コード  
PASSWORDの登録

決済後発行される各種コードとPASSWORDを入力して下さい

### STEP 7

センサ使用開始

全て登録が完了いたしました  
センサが使用できます