

ユーザー登録について

ご購入頂きました安心ひつじαをご使用されるにあたり、下記手順にてお進みください。サーバー管理の為の通信管理料を頂戴させていただきます(1,000円/月額)。案内に従いお手続き下さい。



順序	動作	詳細
ステップ1	[ご購入された方]をクリック	安心ひつじのトップホームページ [ご購入された方]をクリックし、ユーザー登録を開いてください
ステップ2	[ユーザー登録]の「個人情報保護方針」を確認	ユーザー登録の個人情報保護方針をご確認のうえ、よろしければ[同意します]をクリックしてください。
ステップ3	[ユーザー登録]の個人情報シート記入	展開された[ユーザー登録]の個人情報シートにご記入下さい。 (※)につきましては必須事項ですので記入漏れの無いようお願いいたします。
ステップ4	内容確認⇒送信	記入後[この内容を確認する]ボタンを押して内容確認頂き問題なければ[この内容で送信する]をクリックしてください
ステップ5	カード決済 確認⇒完了	ご記入いただいたメールアドレスに、後程当社よりカード決済のご案内を送信致しますので、手続きを行っていただきます。 入力後、内容確認頂き問題無ければ登録してください。
ステップ6	グループ・個人コードPASSWORDの発行	カード決済登録確認後、安心ひつじαセンサのグループ・個人コードPASSWORDが登録されたメールが届きます。
ステップ7	iPhoneと通信ユニットを接続	同梱されている「iPhoneと通信ユニット接続手順」をご覧ください。
ステップ8	iPhoneに専用アプリをインストール	同梱されている「iPhone安心ひつじモニターダウンロード手順」をご覧ください。
ステップ9	グループ・個人コードとPASSWORDを入力	発行されたコードとPASSWORDを入力してください。
ステップ10	センサ使用開始	全て登録が完了いたしました。 センサが使用できます。



通信イメージ図

【対象】

- ★一人暮らしの方
- ★介護・医療の必要な方
- ★ご自身の健康管理をしたい方



安心ひつじα




※ ご自宅内閲覧可能

Network



【対象】

- ★ご家族の方
- ★ご親戚の方
- ★ご近所の方
- ★かかりつけ医
- ★医療従事者
- ★介護施設…

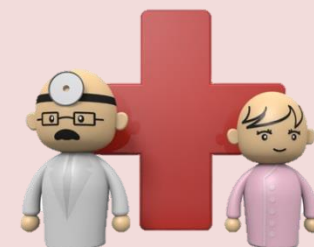

※ メールでの状況送信

※ モニターdataとの情報共有