

## Android 版ビューアソフト 簡易説明

### 基本構成

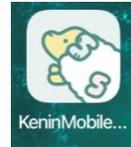
本説明は、ブラウザ版安心ひつじシステムにて稼働するビューアソフト「Kenin Mobile App」の Android 版についての説明となります。ブラウザ版安心ひつじシステムでは、ご要望の多かった介護ソフトとの連動や現場での設定変更など機能を強化するためシステム構成も一部刷新しました。また、ビューアアイテムとしてのご要望のあった Android 版を追加したことで IOS 版と選択してご利用していただく事が可能となりました。

### 目次

1. インストール
2. 表示説明・操作

#### 1. インストール

- (1)Google Store を立ち上げます。
- (2)「Kenin Mobile App」を検索します。
- (3)検索で検出されたアプリをダウンロードしてください。
- (4)アプリをタップし立ち上げてください。
- (5)予め指定された施設専用の※Username(ID)、Password を入力し、「Sign In」 をタップしてください。

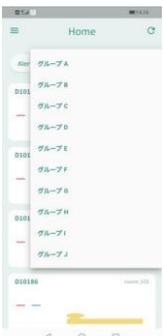


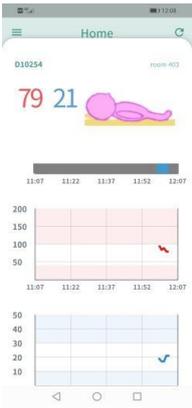
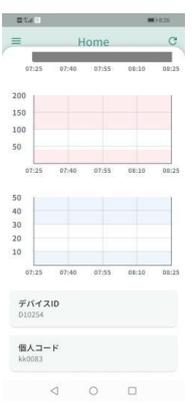
以上でアプリが対象施設のセンサーを表示します。

※Username(ID)及び Password はセンサー導入時に弊社より施設毎の設定情報を提供いたします。

#### 2. 表示説明

##### 2. - 1 基本画面

<p>①</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・表示は MAX60 名、登録したセンサー台数すべて閲覧できます。</li><li>・縦にスクロールすることによって全部のセンサーが閲覧可能出す。</li></ul>
<p>②</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・グループは 10 グループ分まで表示可能です。</li><li>・ブラウザの設定で任意にグループ分けができるので、任意で作成したグループのみを表示して閲覧することが出来ます。</li></ul>

<p>③</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・閲覧したいセンサーをタップすることで、個人のセンサー状況を確認することが出来ます。</li> <li>・赤字は心拍、青字は呼吸</li> <li>・人型は、青が男性、ピンクが女性（ブラウザーで設定・変更可能）</li> <li>・ステータスバーは直近 1 時間の離床（グレー）、安静臥床（ブルー）、寝返り等の体動（オレンジ）に色分けで表示。</li> </ul>
<p>④</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・更に個人表示をスクロールすると、ステータスバー・心拍グラフ・呼吸グラフ・デバイスID（センサ番号）・個人コード表示が表示されます。</li> <li>・折れ線グラフのグラフ線をタップすると、時間ごとの計測数字がグラフ線上部に表示。</li> <li>・グラフ内心拍・呼吸の閾値設定域は白、閾値外はそれぞれ薄いピンク、薄いブルーで表示されており、異常計測された記録が分かり易く。</li> </ul>

## 2-2 プッシュ通知・アラート通知

<p>①</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アラートを検知すると、プッシュ通知でアラート情報が表示されます。</li> <li>・アラートをタップすると、アプリが起動して対象のセンサーを表示します。</li> <li>・アラートが発生しているセンサーは、背景がピンク色で表示し、アラート音が鳴ります※要設定</li> </ul>
<p>②</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・複数のアラートが発生している場合、「Alert」をタップすると、アラート発生しているセンサーのみが表示されます。</li> </ul>
<p>③</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アラート発生している枠をタップすると、赤字でアラート発生理由・アラート発生時間が表示されます。</li> <li>・その下部に、「アラート解除」が表示されるので、こちらをタップするとアラートが解除されます。</li> </ul>